

Material	Code	Greiner Vacuette®	Sarstedt Monovette®	Empfohlene g-Zahl (RZB)	
Serum - Trenngel	Z			EBA 200 2800 × g - 10 Min ≈ 5400 rpm Einstellung: 54x100	EBA 270 2250 × g - 10 Min ≈ 4000 rpm Einstellung: 40x100
Citratplasma 1:10	9 NC				
Heparin-Plasma	LH				
EDTA-Plasma	K3E / KE				
Urin	für Urinsediment				

Umrechnung g-Zahl zu Umdrehungen pro Minute (RPM/upm) in Abhängigkeit zum Rotor-Radius

Rotor-Radius (r) in mm	400 × g	1500 × g	1800 × g	2000 × g	2250 × g	2500 × g	2800 × g
	RPM / upm ↓	RPM / upm ↓	RPM / upm ↓	RPM / upm ↓	RPM / upm ↓	RPM / upm ↓	RPM / upm ↓
60	2400	4750	5200	5450	5800	6100	6450
65	2350	4500	5000	5250	5550	5850	6200
70	2250	4400	4800	5050	5350	5650	5950
75	2200	4250	4650	4900	5200	5450	5750
80	2100	4100	4500	4750	5000	5300	5600
EBA 200	85	40x100	44x100	46x100	49x100	51x100	54x100
	90	3850	4250	4450	4750	5000	5250
	95	1950	3750	4100	4350	4600	5100
	100	1900	3650	4000	4250	4500	5000
	105	1850	3600	3900	4150	4350	4850
	110	1800	3500	3850	4050	4250	4750
	115	1750	3400	3750	4000	4200	4650
	120	1720	3350	3650	3850	4100	4550
EBA 270	125	17x100	32x100	36x100	38x100	40x100	