

Kapilläre Blutentnahme Greiner Mini Collect®



labor team w ag

Material



M900524
Nativ – Trenngel
zur Serum-
gewinnung



M900526
EDTA



M900525
Heparin



M9136
Einweg-Lanzette

Weitere Tipps zu Vorbereitung und Entnahme sowie Entnahme bei Säuglingen & Kleinkindern → Rückseite



1
Einstichstelle desinfizieren



2
Schutzkappe mit einer
Drehbewegung entfernen



3
Lanzette positionieren und
Stempel eindrücken



4
Ersten Blutstropfen
abwischen



5
Weitere austretende
Blutstropfen mit dem
Trichter auffangen



6
Trichter entlang der Fingerkuppe
wischen und das Blut auffangen



7
nach Beendigung der
Entnahme EDTA- und Heparin-
Röhrchen 5x gut über den
Deckel kippen



8
Nativ- und Heparin-Röhrchen
mit Trenngel in der Praxis
zentrifugieren



9
für Versand nicht ab-
pipettieren (Materialverlust)

Hinweise siehe Rückseite ↗

