


ABNAHMEANLEITUNG OXYUREN ANALABSTRICH



1

Der Testkit besteht aus einem eSwab® Entnahmeröhrchen (Copan) inkl. Tupfer.

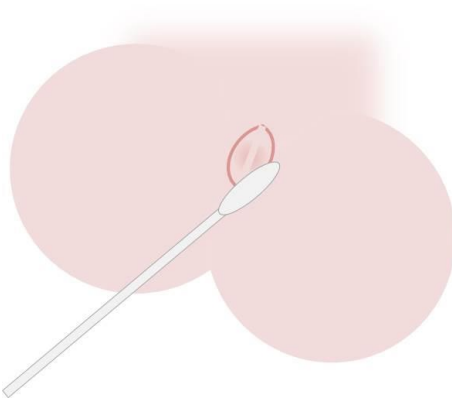

2

Probenahme.
Morgens unmittelbar nach dem Aufstehen vor dem Toilettengang.
Unter Drehbewegung den Tupfer mit Druck über die Haut direkt um die Analöffnung ziehen. Die mit dem blossen Auge unsichtbaren Eier sitzen in den Hautfalten nahe der Analöffnung.



3

Tupfer nach Probenahme zurück ins Probenröhrchen stecken und bei farbig markierter Stelle abbrechen.



4

Probenröhrchen mit Deckel schliessen und mit Patientendaten beschriften.

Wichtig

Amies-Medium nicht ausleeren. **Probenröhrchen nicht mit Stuhlmaterial befüllen, sondern nur beigefügten Tupfer verwenden.**