


Zentrifuge EBA270 - Anleitung

Deckel öffnen:


Der Deckel lässt sich nur öffnen, wenn die Zentrifuge eingeschaltet ist und der Rotor stillsteht. Sollte sich der Deckel trotzdem nicht öffnen lassen, muss mittels dem mitgelieferten Plastikstift die Notentriegelung (siehe Abbildung; rot eingerahmt) durchgeführt werden.

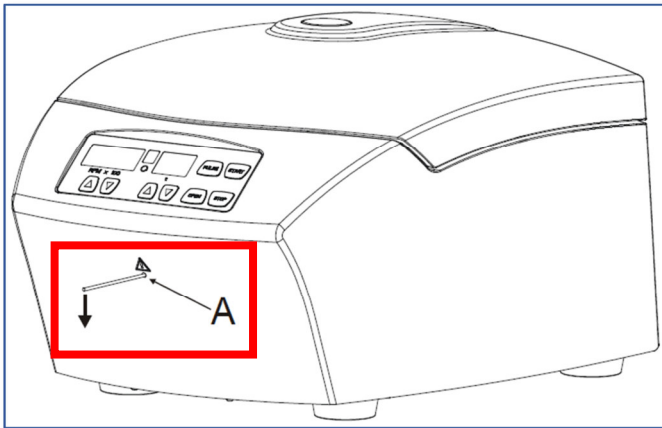


Zu beachten:

- Das Serumröhrchen nach Abnahme verschlossen ca. 30 min aufrecht stehen lassen
- Das Röhrchen in die Zentrifuge geben.
ACHTUNG: Die Rotoren und Gehänge dürfen nur symmetrisch beladen werden (siehe Abbildung). Die Zentrifugiergefäße müssen gleichmässig auf alle Plätze des Rotors verteilt werden. Allenfalls ein identisches Röhrchen mit der gleichen Menge Wasser füllen und als Gegengewicht verwenden.
- Nur verschlossene Röhrchen dürfen zentrifugiert werden.
- Beim Beladen und beim Ausschwingen der Gehänge während des Zentrifugationslaufes darf keine Flüssigkeit in den Schleuderraum gelangen.
- Deckel mittig schliessen.

Korrekt, symmetrisch beladen (2, 4, 6)

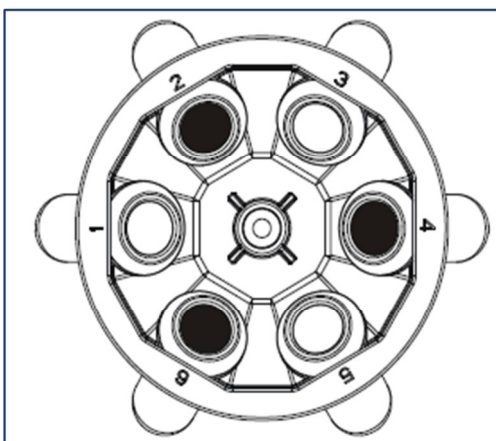

Falsch, asymmetrisch beladen (2, 3, 5)

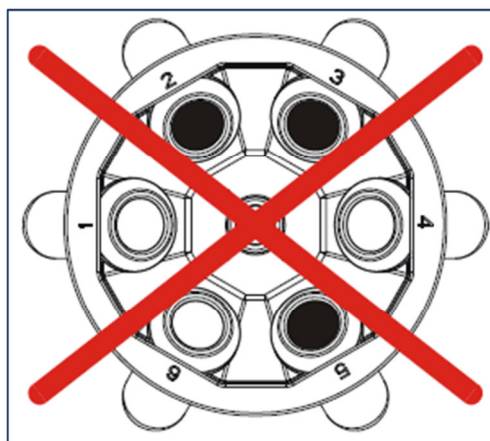

- Einstellung für Blutproben: 40 x 100 bei 10 min. (Die 40 in das linke Bedienfeld, die 10 in das rechte Bedienfeld eingeben)
- Serum wird mit einem fixen Trenngel getrennt und kann so, ohne umpipettieren, dem Kurier mitgegeben werden.